


APDシステム

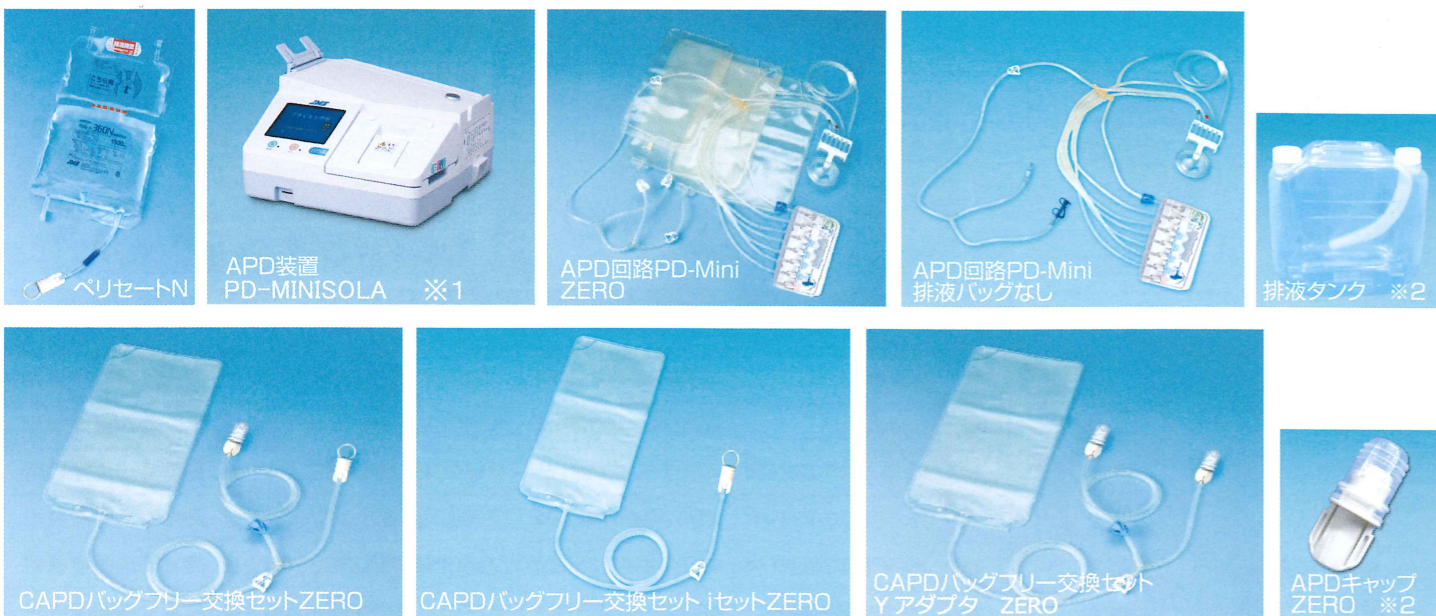

販売名称	型式	入数/箱	品番	JANコード	薬価基準収載 医薬品コード	承認番号
ペリセート360N 腹膜透析液	A1000mL STD ZERO	8	JC-A36N10SZR	4987494149759	3420415A2049	22100AMX00523000
	A1500mL STD ZERO	4	JC-A36N15SZR	4987494099733	3420415A3045	22100AMX00523000
	A2000mL STD ZERO	4	JC-A36N20SZR	4987494096930	3420415A4041	22100AMX00523000
	A3000mL STD ZERO	3	JC-A36N30SZR	4987494096947	3420415H1040	22100AMX00523000
ペリセート400N 腹膜透析液	A1000mL STD ZERO	8	JC-A40N10SZR	4987494152841	3420416A2043	22100AMX00524000
	A1500mL STD ZERO	4	JC-A40N15SZR	4987494099757	3420416A3040	22100AMX00524000
	A2000mL STD ZERO	4	JC-A40N20SZR	4987494096954	3420416A4046	22100AMX00524000
ペリセート360NL 腹膜透析液	A1000mL STD ZERO	8	JC-A36L10SZR	4987494154739	3420426A2047	22100AMX00521000
	A1500mL STD ZERO	4	JC-A36L15SZR	4987494099832	3420426A4040	22100AMX00521000
	A2000mL STD ZERO	4	JC-A36L20SZR	4987494099856	3420426A6042	22100AMX00521000
	A3000mL STD ZERO	3	JC-A36L30SZR	4987494099870	3420426A8045	22100AMX00521000
ペリセート400NL 腹膜透析液	A1000mL STD ZERO	8	JC-A40L10SZR	4987494159765	3420427A2041	22100AMX00522000
	A1500mL STD ZERO	4	JC-A40L15SZR	4987494099894	3420427A4044	22100AMX00522000
	A2000mL STD ZERO	4	JC-A40L20SZR	4987494099917	3420427A6047	22100AMX00522000
	A3000mL STD ZERO	3	JC-A40L30SZR	4987494099931	3420427A8040	22100AMX00522000

販売名称	型式	入数/箱	品番	JANコード	医療機器承認番号	クラス分類
APD装置PD-MINISOLA	PD-06	1	JM-PDMINISOLA	4987494269129	21900BZX01248A01	Ⅲ:高度管理医療機器
APD回路 PD-Mini	ZERO	10	JC-IPDMINIZR	4987494052400	21000BZZ00218000	Ⅲ:高度管理医療機器
	ZERO 排液バッグなし	10	JC-IPDMINIZR2	4987494052417	21000BZZ00218000	Ⅲ:高度管理医療機器
	APDキャップ ZERO ※2	60	JC-IPDMINICZR	4987494052424	21000BZZ00218000	Ⅲ:高度管理医療機器
CAPD バッグフリー 交換セット	ZERO	30	JC-IBBFZR	4987494052431	20100BZZ00880000	Ⅲ:高度管理医療機器
	iセット ZERO	30	JC-IBBFISZR	4987494058433	20100BZZ00880000	Ⅲ:高度管理医療機器
	Yアダプタ ZERO	30	JC-IBBFYZR	4987494262229	20100BZZ00880000	Ⅲ:高度管理医療機器

※1 レンタルで対応しています。 ※2 医薬情報担当者にお問い合わせください。

●規格について予告なしに変更する場合があります。



製造販売業者  
株式会社 ジェイ・エム・エス  
お問い合わせ先  
東京本社 TEL (03)6404-0602  
〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル




2015.03.05XC122-LP  
2017.10.26XC122-RA



CAPD 接続システム

ZERO SYSTEM®

ZERO SYSTEM

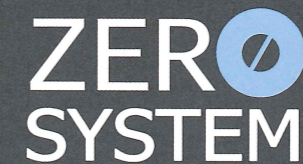


# ZERO SYSTEM

使いやすさとは何か? を追求し、CAPDの原点に帰り、手動式の良さを見直しました。安全性を追求し進化したマニュアルシステムです。


## 接続チューブ (おなかのチューブ)

### 1. 安全機構 クローズドシステム

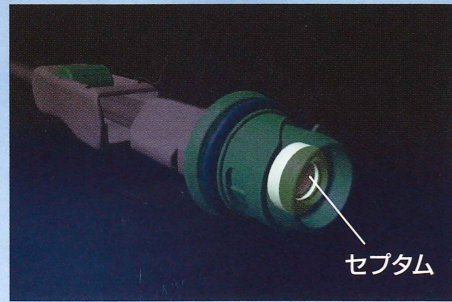


シリコンゴム製のセプタムによる、流路のクローズド化を実現。セプタム表面は指で触ることができません。

### 2. 安心機構 フェイルセーフ構造

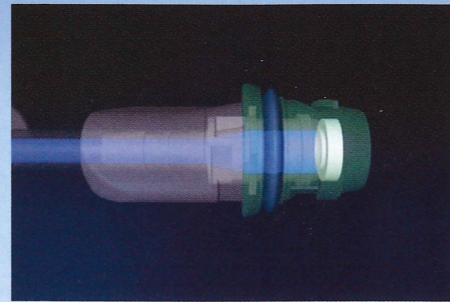


セプタムの採用により、万が一、チューブクランプを閉め忘れた時でも、透析液が外にこぼれ出ない構造です。

### 接続状態 クリック感で接続完了を確認

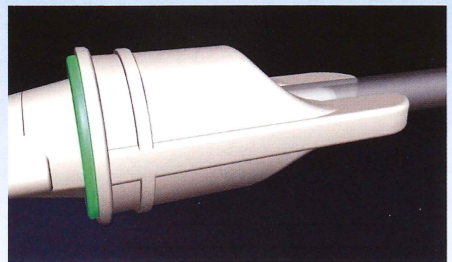


コネクタを90度回転させるだけで簡単に接続でき、クリック感で接続完了を確認できます。

### ニヶ所で気密性を確保

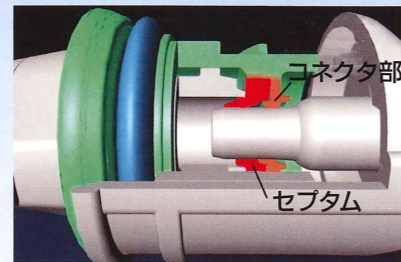

オスコネクタはセプタムのスリットを押し広げながら流路を確保し、セプタムとコネクタ開口部の両方で、気密性を確保します。

### 切り離し 流路を自動的に閉鎖

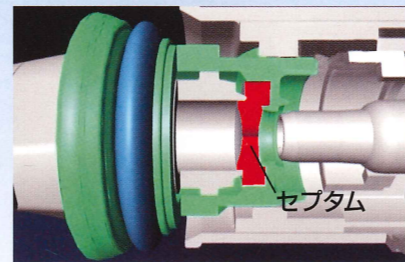


注液終了後、コネクタの接続を解除すると、セプタムが自然に閉じます。

## APD回路


### 1. 安全機構

接続チューブ同様に、APD回路にもセプタムを採用しました。

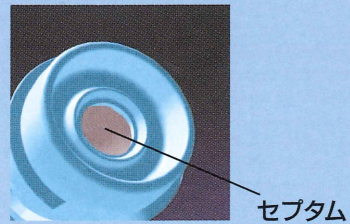


### 3. ラインをコネクタの色でわかりやすく判別

濃度変更ライン、バッグライン、加温ラインの各コネクタの色を変えました。

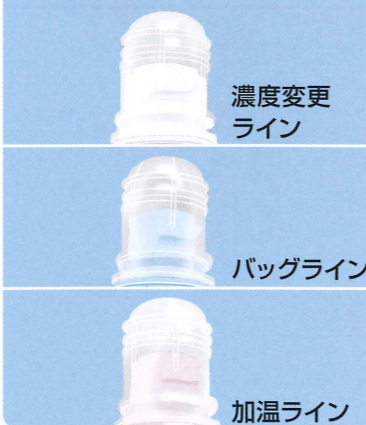

### 2. クランプ操作の簡略化

セプタムの採用により、クランプが不要になりました。

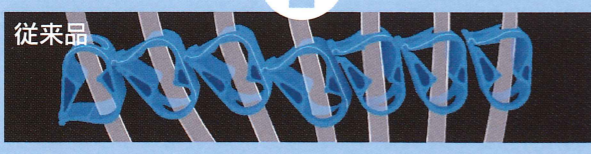


## 器材一覧



販売名称	型式	入数/箱	品番	JANコード	医療機器承認番号	クラス分類
JMS CAPDシステム	カテーテルアダプター-RD	1	JC-IARD	4987494164271	16100BZZ00696000	Ⅲ：高度管理医療機器
	チタニウムアダプター-B	1	120-1010	4987494820740	20900BZZ00647000	Ⅲ：高度管理医療機器
JMS CAPD接続チューブ	RD250 SPN ※250mm	1	JC-IERD025SPN	4987494048175	21600BZZ00352000	Ⅲ：高度管理医療機器
	RD400 SPN ※400mm	1	JC-IERD040SPN	4987494048182	21600BZZ00352000	Ⅲ：高度管理医療機器
	RD600 SPN ※600mm	1	JC-IERD060SPN	4987494075607	21600BZZ00352000	Ⅲ：高度管理医療機器
	UN250 SPN ※250mm	1	JC-UN025SPN	4987494085781	21600BZZ00352000	Ⅲ：高度管理医療機器
	UN400 SPN ※400mm	1	JC-UN040SPN	4987494085804	21600BZZ00352000	Ⅲ：高度管理医療機器
	UN600 SPN ※600mm	1	JC-UN060SPN	4987494085811	21600BZZ00352000	Ⅲ：高度管理医療機器
JMS PDキャップキットS		30	JC-IBSPN	4987494048168	21600BZZ00477000	Ⅲ：高度管理医療機器

## ツインバッグシステム

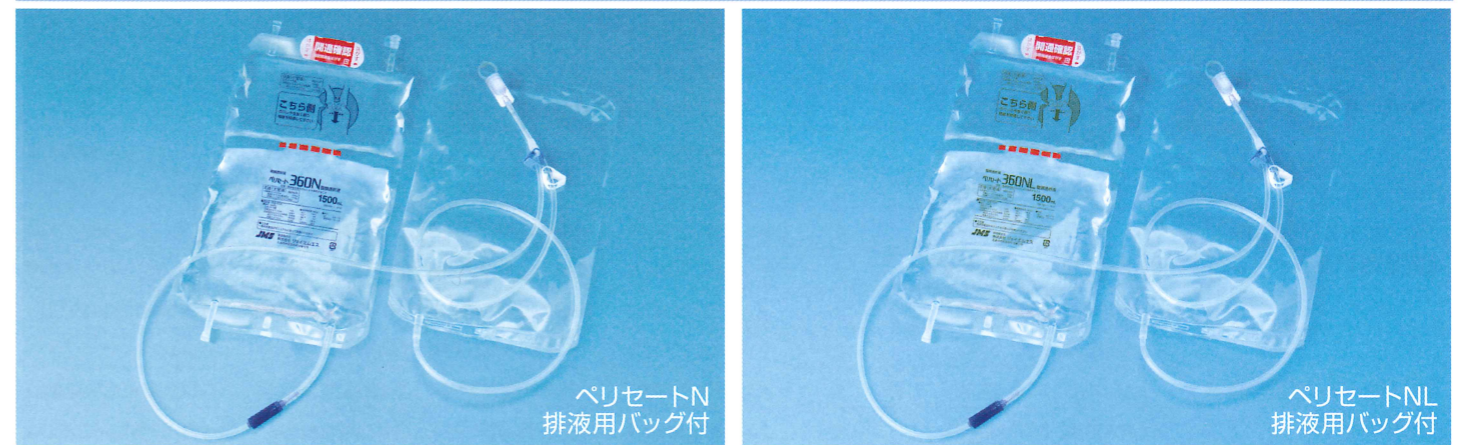

販売名称	型式	入数/箱	品番	JANコード	薬価基準収載医薬品コード	承認番号
ペリセート360N 腹膜透析液 (排液用バッグ付)	A1000mL 排液用バッグ付 ZERO	8	JC-A36N10TWZR	4987494160778	3420415A6044	22100AMX00523000
	A1500mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A36N15TWZR	4987494096978	3420415A7040	22100AMX00523000
	A2000mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A36N20TWZR	4987494096985	3420415A8047	22100AMX00523000
	A2500mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A36N25TWZR	4987494161768	3420415H6034	22100AMX00523000
ペリセート400N 腹膜透析液 (排液用バッグ付)	A1000mL 排液用バッグ付 ZERO	8	JC-A40N10TWZR	4987494162673	3420416A6049	22100AMX00524000
	A1500mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A40N15TWZR	4987494096992	3420416A7045	22100AMX00524000
	A2500mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A40N25TWZR	4987494097005	3420416A8041	22100AMX00524000
ペリセート360NL 腹膜透析液 (排液用バッグ付)	A1000mL 排液用バッグ付 ZERO	8	JC-A36L10TWZR	4987494163908	3420426A3043	22100AMX00521000
	A1500mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A36L15TWZR	4987494098637	3420426A5046	22100AMX00521000
	A2000mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A36L20TWZR	4987494099771	3420426A7049	22100AMX00521000
ペリセート400NL 腹膜透析液 (排液用バッグ付)	A1000mL 排液用バッグ付 ZERO	8	JC-A40L10TWZR	4987494168583	3420427A3048	22100AMX00522000
	A1500mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A40L15TWZR	4987494099795	3420427A5040	22100AMX00522000
	A2500mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A40L20TWZR	4987494099818	3420427A7043	22100AMX00522000
ペリセート400NL 腹膜透析液 (排液用バッグ付)	A2500mL 排液用バッグ付 ZERO	4	JC-A40L25TWZR	4987494168637	3420427H1035	22100AMX00522000